



Knowledgebase 0068: Reset of controller PC

La documentation explique comment réinitialiser le PC du contrôleur.
Veuillez suivre scrupuleusement chaque étape et utiliser les outils fournis, sinon vous risquez d'endommager la machine et ses pièces.
Applicable pour D20II/D30II/D30II/D40II

<p>1 Ouverture de l'imprimante</p> <p>La première étape consiste à retirer le cadre en aluminium.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Retirer les 4 vis du cadre (2 de chaque côté)2. Saisissez le cadre en aluminium par le bas et tirez-le avec précaution, puis soulevez le cadre en aluminium sur le dessus de l'imprimante (pour les D30II/D40II, deux personnes sont conseillées pour cette étape). <p>La deuxième étape consiste à retirer le capot inférieur avant.</p> <ol style="list-style-type: none">1. En fonction de la date de l'entrée en vigueur de la e la fabrication, le couvercle est éventuellement fixé avec des vis à l'arrière, retirez-les d'abord.2. Retirer avec précaution le capot avant	  
---	---

2 **remise à zéro du contrôleur-PC**

A l'intérieur du couvercle se trouve le contrôleur-PC. Pour la réinitialisation du contrôleur-PC, l'imprimante doit être mise sous tension.

1. Poussez et maintenez le bouton blanc intérieur jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton blanc intérieur jusqu'à ce que les lumières s'allument à nouveau.
3. Vérifier le démarrage du PC à l'écran
4. Remonter toutes les pièces démontées



Revision

Date	Who	Info
2018-01-23	RK	