

Remplacer le capteur qui détecte la fermeture de la porte

Applicable for: – X30/X40	Required Tools: – Allen Key – Flat screwdriver – wrench	Recommended Personal Protective Equipment: – Gloves	Addressee of This Document: – Main User – Customer Support – Technician
Related guides: – Guide0014_Removing the housing_[All][10.20.30.40]_ver2		Spare part article number: – KE000844	

Preparation:


- Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation, vérifiez la position des commutateurs.



The switches are on the right side

Step 1: Remove the Housing

- Reportez-vous au Guide 0014, le boîtier peut être retiré. Les micro-interrupteurs sont visibles. (Régler la position du capot sur la position médiane afin que tous les micro-interrupteurs ne soient pas touchés par les tiges.)

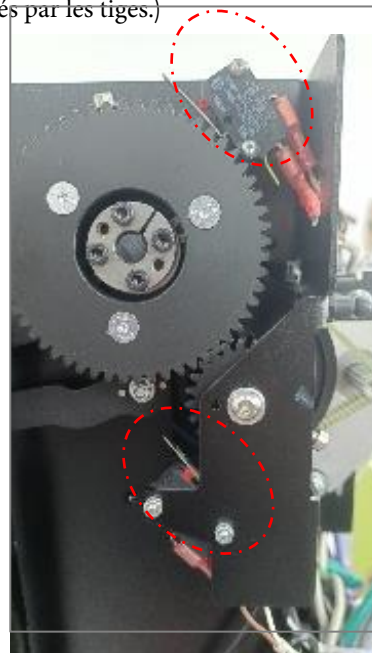


Step 2: Remove the micro switch

- N'oubliez pas la position de chaque câble. Ils sont connectés aux broches qui sont mises en évidence comme ci-dessous :



- Desserrer les vis fixes, retirer doucement et lentement les câbles en les poussant à l'aide d'un tournevis plat.
(Ne pas tirer directement sur les câbles pour éviter de les endommager).

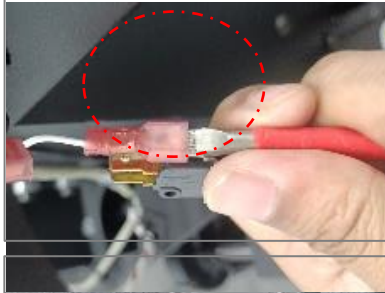

Step 3: Install the new micro switches

Préparez les nouveaux micro-interrupteurs, installez-les correctement.

Insérez les câbles de haut en bas dans l'ordre suivant :

Marron

Blanc

Blanc

Marron

(Veuillez tenir compte de la situation réelle sur place)

Functionality Test:

Vérifiez les câbles et assurez-vous que leur position est correcte.

Ouvrez et fermez la hotte manuellement, assurez-vous que ces deux micro-interrupteurs peuvent être touchés par les tiges.

