


Comment nettoyer les éléments optiques :

Applicable : <ul style="list-style-type: none">- x10+ / x20+- x30II / x40II	Outils requis : <ul style="list-style-type: none">- Clé Allen (M2)- Lingettes nettoy- Microfibre- Isopropanol- Nettoyant vitre (Sans stries)	Equipement de sécu. Recommandé : <ul style="list-style-type: none">- Gants	A qui s'adresse le doc : <ul style="list-style-type: none">- Utilisateur principal- Support technique- Technicien
---	---	---	--

Step 1: Identifiez et retirez les 6 vis Allen . qui maintiennent le verre de sécurité en place

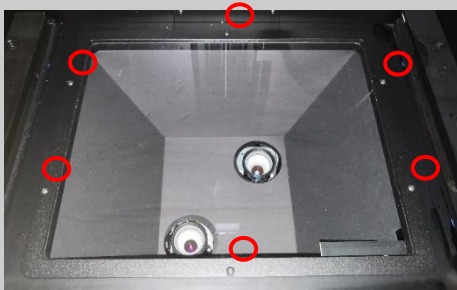

**** Attention : Lentilles moteur exposées ****

Step 4 : Retirez le couvercle de la lumière parasite avec précaution afin de ne rien faire tomber dans l'entonnoir à papier situé en dessous.



**** Attention : Lentilles moteur exposées ****

Step 2: Retirez le verre de sécurité avec précaution afin de ne pas de laisser tomber des vis ou d'autres composants à travers le couvercle du Stray-Light.



**** Attention : Lentilles moteur exposées ****

Step 5: Utilisez le chiffon en microfibras pour nettoyer la ou les lentilles du moteur lumière. Il faut faire très attention lors de cette opération.



Step 3: Nettoyez d'abord la vitre de sécurité des deux côtés avec de l'isopropanol, puis avec le nettoyant pour vitres afin d'éliminer les traces chimiques résiduelles.



**** Attention : Lentilles moteur exposées ****

Step 6: Insérez le couvercle de la lumière parasite et positionnez la sécurité sur les trous des vis Allen. Fixez les vis Allen, veillez à ne pas salir le verre de sécurité.