

Comment charger un fichier sur usineuse M1 depuis sa clé USB

1. Insérez votre clé USB dans le port USB le plus haut.



2. Rendez-vous à l'écran sur la page principale




3. Appuyez sur l'onglet en bas à droite : « Documents »




4.

* Choisissez le nom du fichier souhaité dans le répertoire correspondant de la clé =>> vers la machine (vérifiez bien le chemin d'accès en haut!)

* Appuyez ensuite sur « entrée de fichier » pour valider votre choix.

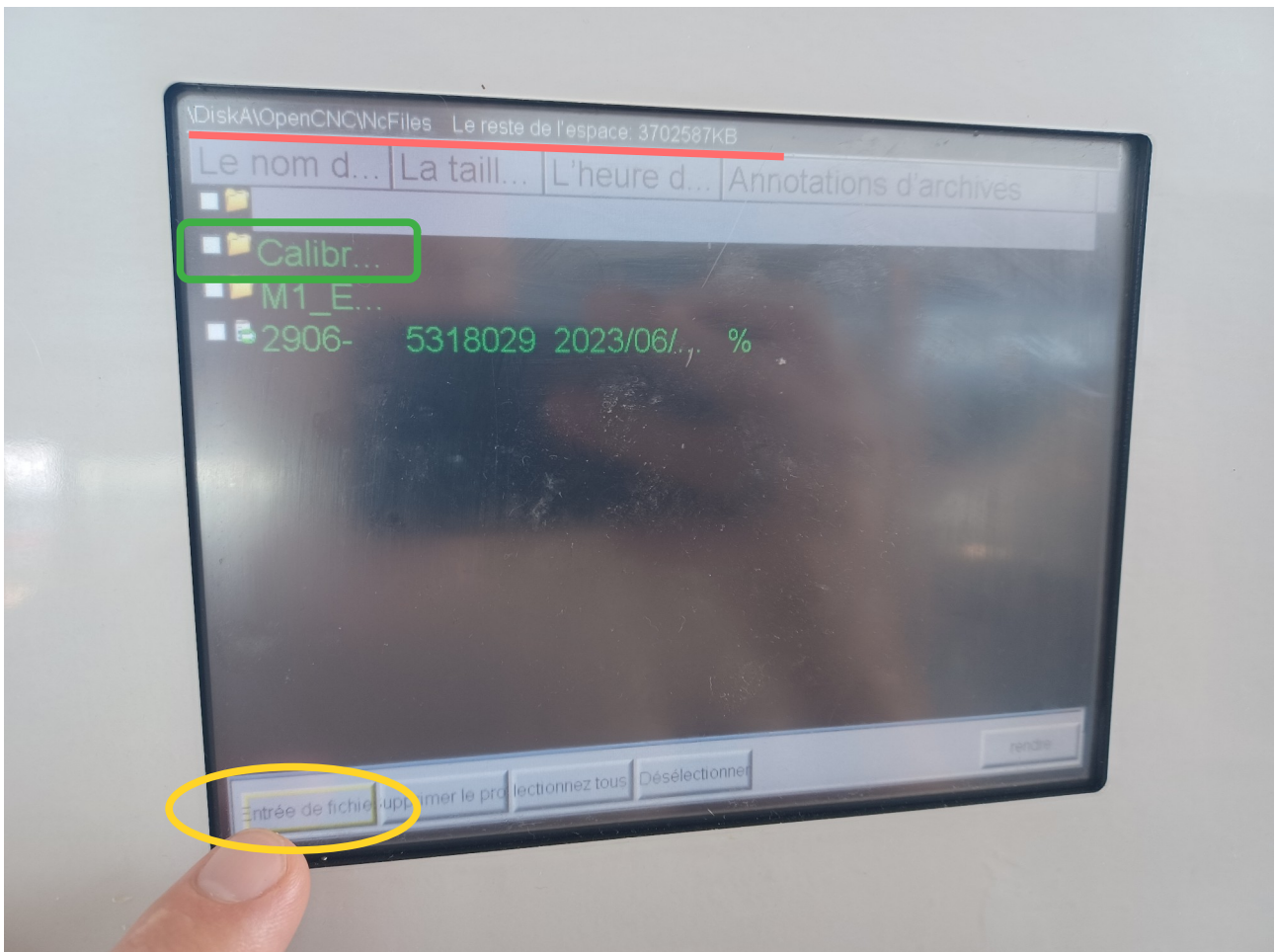

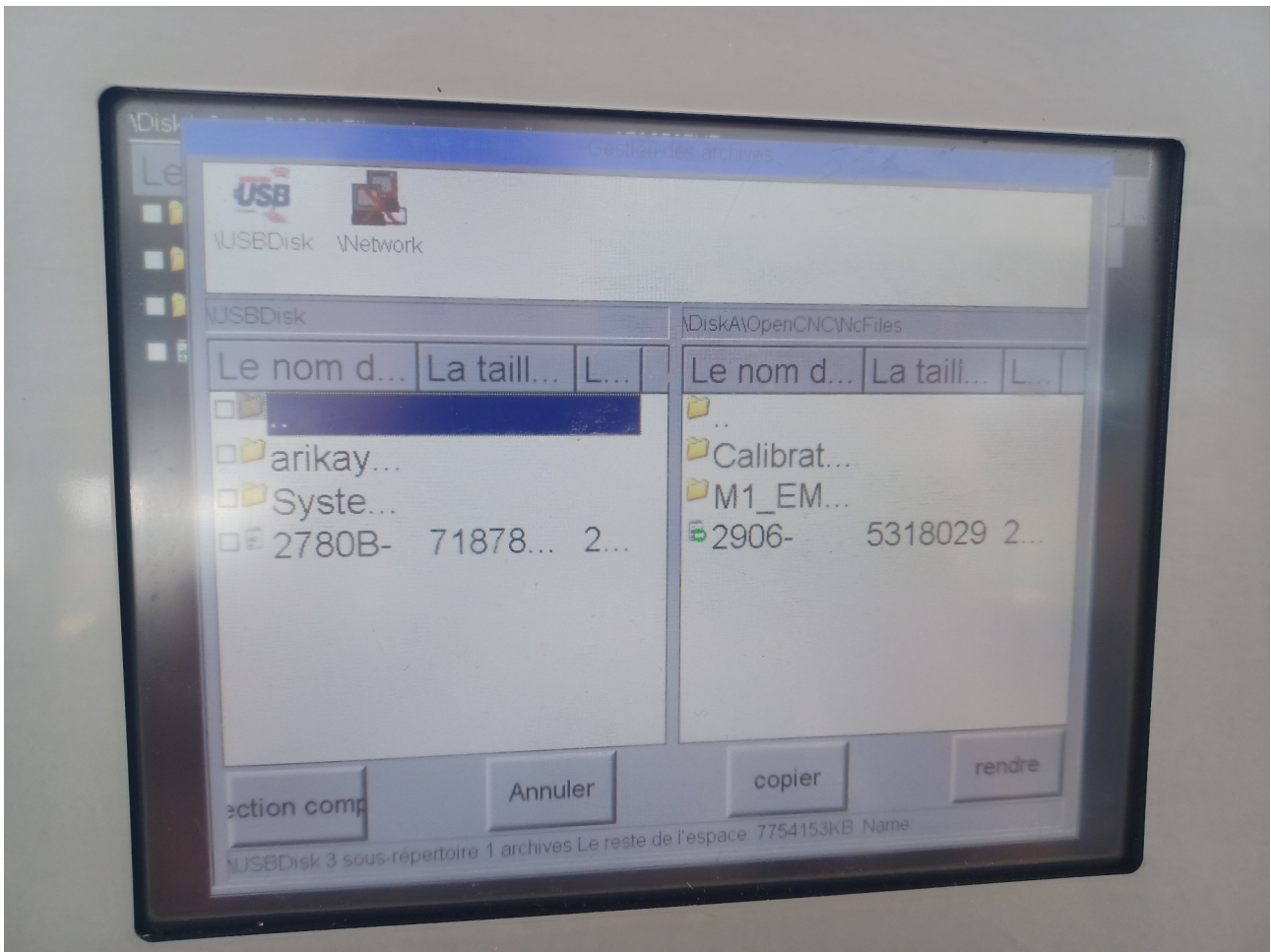

5. Validez et sortez de cette fenêtre en appuyant sur « **Rendre** » pour revenir à l'écran d'accueil, puis appuez sur commencer si vous souhaitez charger le fichier en question.

