

## Guide0057 Démontage panneaux

<b>Applicable for:</b> – x50	<b>Required Tools:</b> – Allen keys	<b>Recommended Personal Protective Equipment:</b>	<b>Addressee of This Document:</b> – Main User – Customer Support – Technician
---------------------------------	--	---	---

**Note:**

Le guide montre comment démonter complètement le boîtier. Selon votre intention, il n'est peut-être pas nécessaire de retirer toutes les parties du boîtier.



**Preparation:**

- Mettre l'imprimante hors tension
- Retirer le câble d'alimentation

**Step 1:**

Pour retirer les couvercles avant et arrière, les éléments latéraux de l'imprimante doivent être retirés au préalable.




**Step 2:**

Retirez les deux vis situées sous l'élément latéral inférieur des deux côtés de l'imprimante.



**Step 3:**

Retirez l'élément inférieur en le tirant vers le bas des deux côtés de l'imprimante.

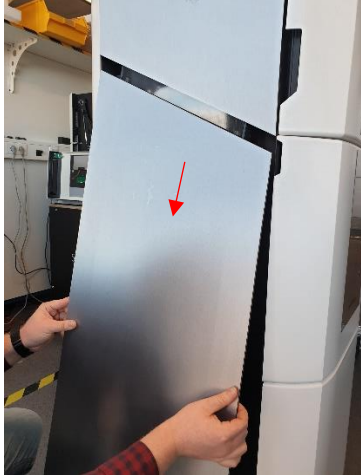


**Step 4:**

Retirer les deux vis situées sous l'élément supérieur des deux côtés de l'imprimante.




**Step 5:**

Retirer l'élément supérieur en le soulevant.

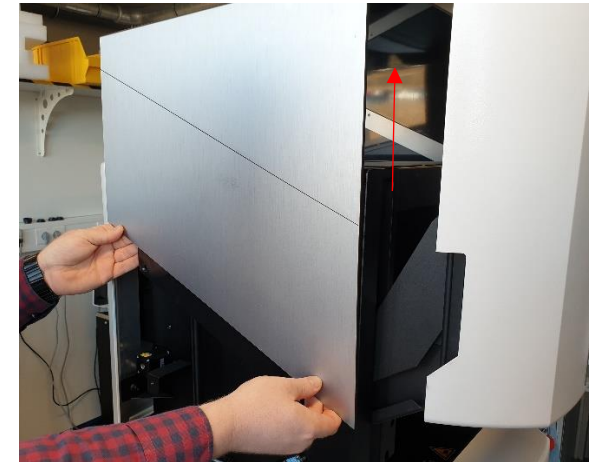

**Step 6:**

Pour retirer le capot arrière supérieur de l'imprimante, tirez dessus pour l'écartier du cadre avec un peu d'effort.

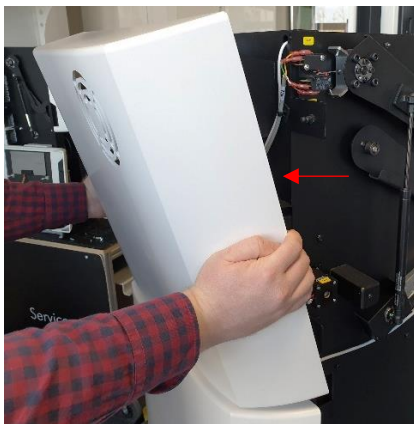

**Step 7:**

Pour retirer le couvercle arrière central de l'imprimante, tirez sur celui-ci pour l'écartier du cadre avec un peu d'effort.




**Step 8:**

Pour retirer le capot arrière inférieur, vous devez desserrer deux vis situées de part et d'autre de l'imprimante.



**Step 9:**

Ensuite, il faut faire un peu d'effort pour l'enlever.

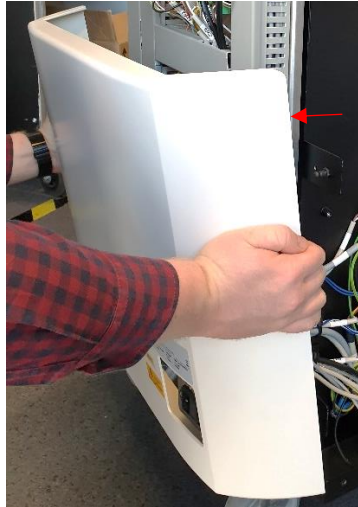

**Step 10:**

Pour retirer le capot inférieur de l'imprimante, tirez dessus avec un peu d'effort.

