



Les pièces ne collent pas à la plate-forme - Les modèles (y compris les bases de support) tombent de la plateforme (entièrement ou partiellement) pendant l'impression.

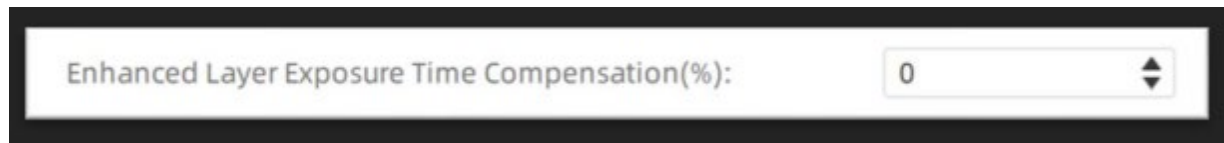

Les pièces se détachent des supports - Les modèles se détachent des supports pendant l'impression

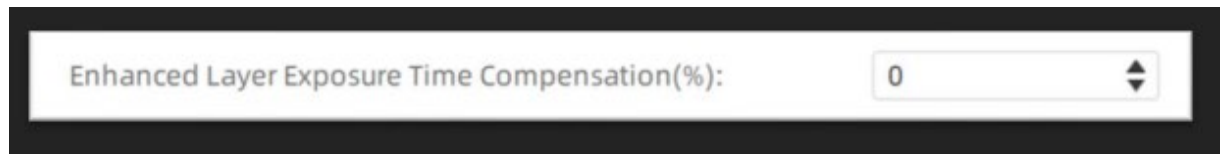

1. Les modèles ont l'air de "peler" 2. Les modèles collent au réservoir au lieu de la plate-forme

Cela dépend entièrement du temps de réaction chimique. Le problème peut indiquer que la résine a besoin d'un peu plus de temps pour se fixer et durcir avant que la plate-forme ne se soulève.



Les modèles semblent présenter des trous, les couches ne se lient pas sur toute la surface.



Wait Time before Exposure (s):

3.50

3.50