


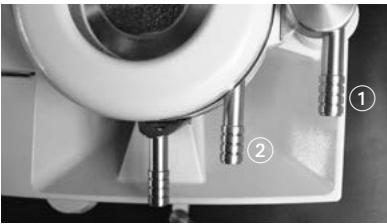


Error	Probable reason	Solution
es films sont partiellement brûlés ou trop mous.	Vous avez saisi un code ou un temps de chauffe incorrect pour le film.	Veillez à respecter les spécifications du lot indiquées sur l'étiquetage du produit
Les résultats du thermoformage sous pression ne sont pas satisfaisants.	Vous avez saisi un code ou un temps de chauffe incorrect pour le film.	Veillez à respecter les spécifications du lot indiquées sur l'étiquetage du produit
Aucune accumulation de pression » ou « Pas de montée en pression »	Lors de l'insertion du modèle dans les granulés, la coupelle du modèle n'a pas été remplie jusqu'à la zone de fermeture. Le rebord du matériau est tiré hors de l'anneau de serrage pendant le thermoformage. Veuillez vous assurer que seuls des films d'un diamètre de 125 mm sont utilisés !	Remplissez la coupelle du modèle avec des granulés jusqu'à la zone de fermeture. 
	L'anneau de compensation n'est pas droit ou ne fonctionne pas correctement à cause de débris. <u>Conseil d'entretien :</u> Assurez-vous que l'anneau de compensation puisse toujours se déplacer librement lorsque vous effectuez les opérations d'entretien indiquées à droite.	Retirez l'anneau d'équilibrage de la chambre de pression en appuyant d'un côté et en soulevant simultanément de l'autre côté. Retirez les 4 rivets et les ressorts de pression. Nettoyez-les et graissez-les avec de la vaseline, puis remettez l'anneau en place  
Difficultés à fermer la chambre de pression	Granulés sur la zone de fermeture du logement / du rebord de la coupelle du modèle	Avant de fermer la chambre de pression, assurez-vous que la zone de fermeture est propre !
Difficultés à ouvrir la chambre de pression	Les différentes étapes pour ouvrir la chambre de pression n'ont pas été réalisées correctement.	Après la dépressurisation et un temps d'attente de 5 secondes, effectuez les opérations suivantes l'une après l'autre : Tournez la poignée de verrouillage de 180° vers l'arrière.  Tournez l'anneau de fermeture à baïonnette vers la gauche. Ouvrez la chambre de pression.