

## RECHERCHE DES PANNES ET RÉGLAGES

Seulement l'ASSISTANCE TECHNIQUE qualifiée peut identifier la cause des pannes et les remèdes convenables. L'opérateur peut effectuer exclusivement les interventions indiquées au tableau ci-dessous.

En cas de panne, s'adresser au Centre d'Assistance autorisé qui, à travers des équipements appropriés et des pièces de rechange originales, pourvoira à remettre le générateur de vapeur en conditions de fonctionnement parfait.



Si les interventions citées ci-dessus se rendent nécessaires plusieurs fois pendant la journée, éteindre l'appareil et s'adresser à un technicien spécialisé.

PANNE	CAUSE	SOLUTION
La signalisation lumineuse verte de l'interrupteur général [10 – page 21] ne s'allume pas lors de l'allumage du générateur de vapeur.	Manque d'alimentation électrique.	Vérifier que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée et que l'interrupteur en amont de l'appareil est validé.
Signalisation lumineuse jaune allumée [2 – page 21]	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Niveau eau au minimum.</li><li>2. Fonctionnement de l'électropompe au-delà de 3 minutes.</li></ol>	1-2. Appuyer sur le poussoir [1 – page 21] pendant 4 secondes au moins.
Signalisation lumineuse d'intervention thermostat de blocage allumée [4 – page 21].	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Niveau eau insuffisant.</li><li>2. Température élevée à l'intérieur de la chaudière.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifier que le robinet en amont de l'appareil est ouvert.</li><li>2. Appuyer sur le poussoir après avoir dévissé le couvercle de protection positionne au-dessous du fond de l'appareil (côté droit).</li></ol>